



MaiMed® – MyClean AS

Produktbeschreibung	Aldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion von Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider im Durchspülverfahren.																							
Anwendung	Das Konzentrat ist als verdünnte Lösung anzuwenden. Anwendung im Durchspülverfahren. Mindestens einmal täglich nach Arbeitsende pro Absaugstelle 20 ml MaiMed® MyClean AS mit 980 ml Wasser verdünnen und durch die zu desinfizierenden Schläuche saugen. Zur Biofilmvermeidung täglich mit der 2%igen Gebrauchslösung mit einer Einwirkzeit von 16 Stunden (über Nacht) anwenden. Nur für den professionellen Gebrauch.																							
Auszeichnungen																								
Ausführungen	<table><tr><th>Artikelbeschreibung</th><th>Inhalt</th><th>Artikelnummer</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE</th></tr><tr><td>Absauganlagen-Desinfektion</td><td>5 l</td><td>79637</td><td>4046153116676</td><td>10306071</td><td>2 Kanister</td></tr><tr><td>Absauganlagen-Desinfektion</td><td>10 l</td><td>79699</td><td>4046153125951</td><td>15202270</td><td>1 Kanister </td></tr></table>						Artikelbeschreibung	Inhalt	Artikelnummer	GTIN	PZN	VE	Absauganlagen-Desinfektion	5 l	79637	4046153116676	10306071	2 Kanister	Absauganlagen-Desinfektion	10 l	79699	4046153125951	15202270	1 Kanister 
Artikelbeschreibung	Inhalt	Artikelnummer	GTIN	PZN	VE																			
Absauganlagen-Desinfektion	5 l	79637	4046153116676	10306071	2 Kanister																			
Absauganlagen-Desinfektion	10 l	79699	4046153125951	15202270	1 Kanister 																			
Einwirkzeiten	Wirksamkeit		Belastung		Normen																			
	Bakterizid		hohe Belastung		EN 13624, EN 13727 / VAH, EN 14561 / VAH 15																			
	Levurozid		hohe Belastung		EN 13624 / VAH, EN 14562 / VAH 15																			
					2% - 15 Minuten																			
Dosiertabelle:																								
fertige Gebrauchslösung (l)			1	2	4	8																		
2,0 %ige Lösung (ml)			20	40	80	160																		
Zusammensetzung																								
In 100 g Lösung sind enthalten: Wirkstoff: 7,5 g Dioctyldimethylammoniumchlorid.																								
Chemisch-physikalische Daten	Dichte		Aussehen		Flammpunkt																			
	0,985 - 0,9951 g/ml		klare, farblose Flüssigkeit		> 43°C																			
pH-Wert																								
nicht verfügbar																								
Viskosität																								
nicht verfügbar																								
Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Gas, Nebel, Dampf, Aerosol nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. Sofort Giftnformationszentrum, Arzt anrufen.																							
Qualitätssicherung	EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Medizinproduktklasse IIb UFI: AWD0-309X-C006-2H8H																							
Verwendbarkeit	3 Jahre																							



MaiMed® – MyClean AS

Haltbarkeit nach Anbruch:

12 Monate nach Anbruch
Gebinde nach dem Gebrauch sorgfältig verschließen.

Symbole

